

ENDOZIME PREMIUM CON A.P.A.

DILUCIÓN DETERGENTE ENZIMÁTICO

Lavado de todo tipo de material e instrumentos quirúrgicos, modo manual y automático.

Composición: Combinación de proteasas, amilasas, lipasas y carbohidrasas.

Temperatura: Todas las temperaturas

Inmersión: mínimo tres minutos.



MODO DE DILUCIÓN	
CANTIDAD DE AGUA	CANTIDAD DE DETERGENTE
20 litros	60 ml
30 litros	90 ml
40 litros	120 ml
50 litros	150 ml
60 litros	180 ml

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con los ojos: Enjuague de inmediato con abundante agua por 15 minutos mínimo.

Mantener los ojos abiertos mientras se enjuaga. Se requiere atención médica inmediata.

Contacto con la piel: Lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua. Quitarse la ropa y calzado contaminados. Si los síntomas persisten, recibir atención médica.

Inhalación: Dirigirse a un lugar con aire fresco. Si los síntomas persisten, recibir atención médica.

Ingestión: No inducir al vomito. Beber mucha agua. Si los síntomas persisten, recibir atención médica.

NOTA: Se diluye 3 cc de detergente enzimático por cada litro de agua

IMPORTANTE: Seguir las instrucciones del fabricante.

