

Premixslip®

LUBRICANTE DE INSTRUMENTOS E INHIBIDOR DE ÓXIDO LISTO PARA USAR

Listo para usar - No diluir - Agite suavemente antes de usar.

MODO DE EMPLEO:

Uso en inmersión - antes de esterilización:

1. Sumerja los instrumentos, previamente lavados con Endozime®, en Premixslip® por 30 segundos.
2. Extraiga el instrumental y deje escurrir.
3. Para instrumentos extremadamente rígidos:
 - a) Sumerja el instrumento en la solución por 5 minutos.
 - b) Abra y cierre rápidamente las pinzas o tijeras dentro de la solución por 30 segundos.
4. Los instrumentos escurridos están listos para el empaquetado y esterilización.
5. Mantenga cubierta la solución de Premixslip® cuando no sea utilizada.

Precauciones: Evite el contacto prolongado con la piel. No ingerir. Mantenga alejado de los niños.



Uso en spray/atomizador - antes de esterilización:

1. Aplique Premixslip® sobre la superficie de los instrumentos y en la caja de trabas.
2. Deje escurrir por 30 segundos
3. Pruebe las cajas de trabas y articulaciones. Re-aplique si es necesario.
(Algunos instrumentos pueden requerir tratamiento por inmersión)
4. Los instrumentos escurridos están listos para el empaquetado y esterilización.
5. No enjuagar.

RUHOF
An ISO Registered Firm

Bayomed
Health Perú