

# SURGISTAIN®

## REMOVEDOR DE ÓXIDO

### Para Instrumentos Quirúrgicos

1. Mezcle una (1) parte de Surgistain® en siete (7) partes de agua caliente (50-80°C)
2. Vierta la solución en un recipiente no poroso.
3. Introduzca el instrumental en la solución de Surgistain® durante 15-25 minutos. **(MANTENGA EL RECIPIENTE TAPADO)**
4. Cepille suavemente (utilizando guantes) con un cepillo de cerdas cortas **(NO metálicas)** para acelerar el proceso y enjuague con abundante agua corriente.



MODO DE DILUCIÓN	
CANTIDAD DE AGUA	CANTIDAD DE REMOVEDOR
5 litros	625 ml
10 litros	1,2 litros
20 litros	2,5 litros
30 litros	3,75 litros
40 litros	5 litros

### PRECAUCIONES:

Surgistain es una solución de ácido suave que puede ser dañina si es ingerida. Evite el contacto con la piel. No ingerir. Mantenga alejado del alcance de los niños.

**PARA USO EXCLUSIVO EN ACERO INOXIDABLE (QUIRÚRGICO). NO USAR EN EQUIPO CROMADO, PLATEADO O NIQUELADO**