

Endozime[®] Premium con A.P.A

Acción Proteolítica Avanzada

Detergente con Múltiples Niveles de Enzimas, con Acción Proteolítica Avanzada e Inhibidores de Corrosión

Diseñado para el uso en todas las Lavadoras de Endoscopios, Lavadoras Desinfectoras, Ultrasonicas y para la Limpieza Manual



Endozime[®] Premium con A.P.A. es una fórmula única de proteasas, amilasas, lipasas, carbohidrasas y enzimas propias con A.P.A. (Acción Proteolítica Avanzada) e inhibidores de óxido, para remover toda la biocarga y proteger el instrumental.

A.P.A. es la última novedad desarrollada por Ruhof Healthcare para incrementar sustancialmente la actividad enzimática y proveer una rápida y más efectiva remoción dentro de los lúmenes de "difícil acceso" en los instrumentos quirúrgicos y endoscopios. Recomendado para reprocesar todo tipo de instrumental, desde el difícil de limpiar hasta el más delicado.

Endozime[®] Premium con A.P.A. contiene aditivos biológicos que aceleran el proceso de licuefacción y solubilización, facilita la acción enzimática y contribuye a la mayor efectividad del producto.

Endozime[®] Premium con A.P.A. reduce el biofilm formado por algunos desinfectantes de alto nivel.

Características

- **Acción proteolítica avanzada - incrementa la acción proteolítica.**
- **Fórmula de enzimas propias, diseñadas para remover toda la biocarga, sangre, carbohidratos, proteínas, polisacáridos, grasas, aceites, ácido úrico, y otros compuestos nitrogenados.**
- **Remueve de forma efectiva toda la materia orgánica.**
- **Inhibidor de óxido.**
- **Biológicamente activo. Acelera el proceso de licuefacción y solubilización.**
- **Seguro de usar en todo instrumental quirúrgico y endoscópico.**
- **No daña metales, plásticos, gomas o tubos corrugados.**
- **No espumoso, pH neutro, no abrasivo, no corrosivo, de fácil enjuague y 100% biodegradable.**
- **Inicia la acción desde el contacto.**
- **Trabaja en todas las temperaturas del agua.**

Modo de Empleo:

Limpieza Manual

1. Diluir Endozime[®] Premium con A.P.A.: 3 ml por litro de agua.
2. Sumergir los instrumentos y endoscopios a limpiar.
3. Para endoscopios: succione a través de los canales antes del remojo.
4. Remojar por 2 minutos para remover todos los contaminantes orgánicos.
5. Enjuagar con agua corriente, agua destilada o estéril.
6. Desechar la solución utilizada.

Limpieza Automática

1. Colocar directamente en el reservorio de la máquina lavadora hasta el tope o,
2. Regular la dilución del lavado para 2 ml por cada litro de agua.

Siga las recomendaciones del fabricante para elegir la correcta dosificación.

Precauciones: Evite el contacto prolongado con la piel. No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños.